



PALA cre-active® Sistema de maquillaje fluido fotopolimerizable

Estas masas cromáticas fotopolimerizables en combinación con Signum Connector, se emplea tanto con acrílicos de base metilinetacrilato termo como autopolimerizables.

Después de un breve tratamiento con chorro de arena (50 µm) o con fresa de diamante y después de haber endurecido y polimerizado el Signum Connector, PALA cre-active se aplica directamente en el color o la consistencia deseados.

PALA cre-active está disponible en 12 colores y varias consistencias, como kit o como recambio.

Contacto en España:

Heraeus S.A.
Forjadores, 16
28660 Boadilla - Madrid
Tlf. +34 913580375
Fax +34 913580368
dental@heraeus.es
www.heraeus-kulzer.com

PALA cre-active®

Maquillajes cromáticos fotopolimerizables para la personalización de prótesis dentales



Antes de aplicar PALA cre-active, la superficie de la prótesis dental se trata con una fresa de diamante o mediante chorro de arena (50 µm) y, seguidamente, se limpia.

A continuación, se aplica una capa fina de conector Signum Connector en la superficie utilizando un cepillo desechable, a lo que sigue la polimerización tras un período de espera de aproximadamente 1 minuto. Después de esto, la prótesis dental está lista para proceder a su acabado según las especificaciones individuales. El material PALA cre-active se aplica directamente en la zona acrílica de la prótesis dental polimerizada utilizando un cepillo o un instrumento de moldeado.

La prótesis personalizada se acaba mediante la polimerización utilizando unidades de fotoendurecimiento como HiLite Power, Heraflash, Unixs y Dentacolor XS: 90 segundos para el endurecimiento de una capa con un espesor máx. de 2 mm.

Formato de suministro disponibles

PALA cre-active (kit)

- 12 x 3g PALA cre-active (blanco, azul hielo, rosa, rojo, granate, negro, encía, rosa gingiva, tono gingiva 200, gingiva R50, rosa claro gingiva, gingiva transparente)
- 1 x guía de tonalidades PALA cre-active,
- 1 x cepillo,
- 20 x cánulas (metal) de 1,2 mm,
- 5 x cánulas (plástico) de 1,87 mm

Nº de referencia 6603 3445

PALA cre-active (recambio)

- blanco Nº de referencia 6603 3447
- azul hielo Nº de referencia 6603 3448
- rosa Nº de referencia 6603 3449
- rojo Nº de referencia 6603 3450
- granate Nº de referencia 6603 3461
- negro Nº de referencia 6603 3462
- rosa gingiva Nº de referencia 6603 3463
- tono gingiva 200 Nº de referencia 6603 3464
- gingiva R50 Nº de referencia 6603 3465
- rosa claro gingiva Nº de referencia 6603 3466
- gingiva transparente Nº de referencia 6603 3467
- encía Nº de referencia 6603 3468